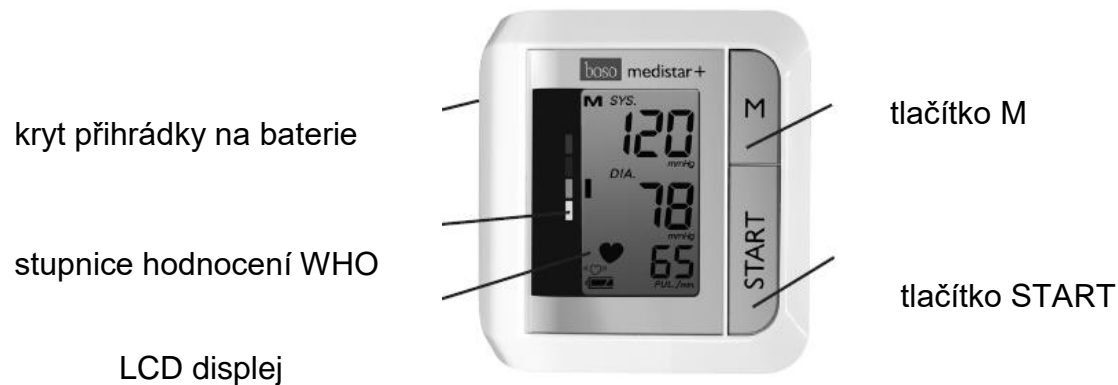




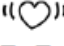

Manžetový automatický tlakoměr

Obj. číslo 201.4928



Přehled přístroje



-  indikace stavu baterií
-  probíhá měření
-  porucha srdečního rytmu během měření
-  hodnota uložená v paměti

Rozsah dodávky

1 tlakoměr
boso-medistar +



2 baterie
LR 03 (AAA)



1 pouzdro



1 návod
k použití



1 pas krevního tlaku




Úvod

Vážený zákazníku, jsme velmi potěšeni, že jste se rozhodl zakoupit si tlakoměr boso.

Značka boso ručí za nejvyšší kvalitu a přesnost a je volbou číslo 1 také pro profesionály: s tlakoměry boso aktuálně pracuje 77 % všech německých lékařů (studie GfK 1/2010). Dlouholeté zkušenosti z profesionální oblasti jsou využity také ve všech přístrojích pro pacienty k samostatnému měření krevního tlaku doma.

Tento přístroj byl podroben naší přísné kontrole kvality a je vaším spolehlivým partnerem pro kontrolu vašich hodnot krevního tlaku.

 Přečtěte si, prosím, před prvním použitím pečlivě tento návod k použití, neboť správné měření krevního tlaku je možné jen při správném zacházení s přístrojem.

V tomto návodu k použití se pro akci uživatele používá symbol „→“.

Potřebujete-li pomoci s uvedením do provozu, použitím nebo údržbou, obraťte se, prosím, na váš specializovaný obchod nebo na výrobce.

Tlakoměr boso-medistar+ je vhodný pro pacienty jakéhokoli věku, jejichž obvod zápěstí je 13,5 až 21,5 cm. Přístroj není vhodný pro novorozence.

Bezdrátové komunikační přístroje jako například bezdrátové přístroje domácí sítě, mobilní telefony, bezdrátové telefony a jejich základní stanice, přenosné vysílačky mohou tento tlakoměr ovlivnit. Proto byste měli od těchto přístrojů zachovat vzdálenost alespoň 3,3 m.

Neočekávaný provozní stav nebo událost, která zhoršila nebo by mohla zhoršit zdravotní stav, je nutno neprodleně oznámit výrobci.

Při použití tohoto přístroje ve zdravotnictví (podle nařízení pro provozovatele lékařských výrobků) je nutno v pravidelných intervalech provádět technické kontroly měření (viz strana 35).

Stručný návod


- Vložte baterie, dbejte přitom na správnou polaritu
- Přiložte přístroj na obnažené zápěstí tak, aby se displej nacházel na spodní straně ruky

 Zápěstí musí při měření být ve výši srdce.

- Měření spustíte (a zrušíte) stisknutím tlačítka START

Po měření se zobrazí naměřené hodnoty systoly, diastoly a pulzu

- Vyvolání paměti: Na vypnutém přístroji stiskněte tlačítko M. První zobrazená hodnota je průměrná hodnota všech uložených měření. Současně se zobrazí počet všech uložených měření, např. „A90“. Po opětovném opakovaném stisknutí tlačítka M se v řadě zobrazí příslušné jednotlivé naměřené hodnoty.

 Tento stručný návod nenahrazuje podrobné informace k zacházení a bezpečnosti vašeho tlakoměru, obsažené v návodu k použití.



Přečtěte si proto, prosím, bezpodmínečně návod k použití!